


APESIN rapid

Sredstvo za brzo čišćenje i dezinfekciju

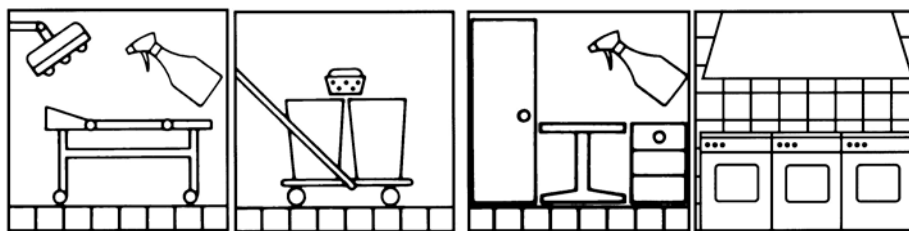

Sastav:

100 g APESIN rapid sadrži 11g didecylidimethyl ammo-nium chloride, 8.4 g cocospropylene diamine guanidinium diacetate, 10 g biaminopropyl dodecylamine, 16 g isopropanol, 5-15% neionskih tenzida, <5% fosfonata. Ostali sastojci: parfemsko ulje. pH vrednost cca. 10.5.

Delovanje:

Novi tip kombinacije aktivnih materija sa širokim spektrom delovanja u ekstremno niskoj koncentraciji za primjenu. Bez formaldehida i ostalih aldehida. Izvrstan učinak čišćenja. Ne oštećuje materijale. Dobra senzorska prihvatljivost kod radnog osoblja i pacijenata. Dermatološki testiran. Primenljiv i u decentraliziranim dozirnim uređajima (BAM-testiran=Nemački savezni institut za istraživanje i testiranje materijala). Korištenjem 2l dozirne boce, sa integriranim dozirnim uređajem, čini doziranje jednostavnim i pouzdanim. Vrlo je ekonomičan zbog niske koncentracije za primenu i brzog vremena delovanja.

Područja primene:

Koristi se za čišćenje i dezinfekciju svih vodootpornih površina u bolničkom sektoru i industriji za preradu prehrambenih proizvoda. Primenljiv na površinama kao što su: prirodni/veštački kamen, metal, keramika, staklo, PVC/PP/PE/ pleksiglas, guma, veštačke smole, linoleum, mesing, VA-čelik, hromiranim armaturama, itd. Zahvaljujući širokom spektru delovanja i kratkom vremenu delovanja idealno je prikladan za područja koja trebaju posebnu zaštitu protiv infekcija, ili područja iz kojih mogu poteći. Može se koristiti i na podovima zaštićenim sa LONGLIFE emulzijama. Primenljiv za mašinska čišćenja.

Primena/Doziranje :

Testiran i odobren prema listi DGHM

	5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
DGHM-VAH, geringe org. Belastung mit Mechanik	0,75%	0,5%	0,25%	0,125%	
DGHM-VAH, hohe org. Belastung mit Mechanik		0,5%		0,25%	
Tbc			3,0%	1%	
Hep. B/HIV		1%	0,5%	0,25%	
Hep. C (B/DV)	0,25%				
Rotaviren	0,25%				
Adenoviren			0,5%	0,25%	
Papovaviren					0,5%
Vakzinaviren		0,5%			
Avian Influenzaviren H3N8	0,5%			0,25%	
DVG Bereich A+B, belastet, 10°C/20°C/z.B.				0,5%	

Dezinfekcija površina U skladu sa DVG (German Society of Health): n.p.r područja A+B at H 10°C/20°C 0.5% /60 min. Za 0.25%no doziranje dodajte 20 ml (= 1 mericu dozirne posudice) na 8l vode. Primenjuje se u postupku vlažnog ili mokrog pranja

Za doziranje: odvrnite beli čep na boci. Lagano pritisnite bocu do se posudica za doziranje ne napuni. Otpustite pritisak. U posudici će ostati tačno 20 ml. koncentrata.

Za nadopunu: odvrnite crveni čep na boci. U praznu 2l bocu nadolijte APESIN rapid iz 2l vrećice za nadopunu. Zavrnite crveni čep..

Kada koristite 5l kanister, dodajte 20ml (=1 pritisak dozirne pumpe) na 8 l vode.

Posebna uputstva:

Nagriza. Sadrži kvaterne amonijeve spojeve. Izaziva opekline. Držati van domašaja dece. Opasan za zdravlje u slučaju gutanja. U slučaju dodira sa očima isperite temeljito čistom vodom i konsultujte lekara. U slučaju dodira sa kožom temeljito isperite čistom vodom. U slučaju gutanja, odmah kontaktirati lekara i pročitati mu etiketu. Pri radu koristiti zaštitne rukavice. Pri pretakanju nositi zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za lice/oči.

Za sigurno korištenje biocida, uvek pre rada pročitati etiketu, i obratiti pažnju na **tačno doziranje**.

Ekologija:

Ovaj proizvod je u skladu sa zakonom o zaštiti okoline i kompatibilnosti detergenata i odgovarajućim regulativama o biorazgradivosti sirovina.

Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odložiti u kontejnere za vredan otpad.

Samo za profesionalnu upotrebu.



Art. Nr. 04605 2 l vrećica za nadopunu

Art. Nr. 0709566 2 l dozirna boca

Art. Nr. 04603 5 l

